

Instruktionsmanual – NanoSeal Total+

BrilliantSmile



Instruktionsmanual NanoSeal Total+

Efter slutningen af blegeresultatet:

Brug mundholderne for bedre applicering (Lad evt. mundholderen blive siddende efter klinikkblegningen)

Fjern evt. kofferdam som anvendes under blegningen.

Applicér Nano Seal Total+ direkte på den tørre tandoverflade.

Gå igennem samtlige tænder som skal beskyttes tre gange.

Anvend de engangsquicksticks og engangsbægre som medfølger i pakken.

Applicér også med fordel de blottede tandhalse samt i mellemrummene.

Applicér også på bagsiden af tænderne, hvis I har bleget tænderne her.

Nano Seal Total+ er en forsegling og er hurtigtørrende, derfor behøves ingen lysesærdning.

Skyl omhyggeligt patientens mund efter forseglingen er slutt.

Hver pakke rækker til 20 behandlinger.

OBS! Forsegl ikke tænder som ikke er færdigbleget.



REE 8579

BrilliantSmile Nordic AB
Stryngången 10, SE-417 64 Göteborg
+46 77 741 41 41

CE 0482