



Calciumhydroxidpulver

Calciumhydroxidpasta til midlertidig rodkanalforbinding

Sammensætning

100 % calciumhydroxid

Egenskaber

Når calciumhydroxidpulveret blandes med destilleret vand, danner det en cremet pasta med en pH-værdi på over 12.

Indikation

Midlertidig rodkanalforbinding til endodontisk behandling.

Brugsanvisning

Forbered, rengør og tør kanalen grundigt.

Bland calciumhydroxidpulveret med destilleret vand til en cremet pasta.

Påfyld kanalen med pastaen ved hjælp af en Lentulo-spiral eller et tilsvarende instrument. Undgå at overfylde rodkanalsystemet for at undgå risikoen for apikal ekstusion.

Hullet fyldes med et midlertidigt fyldningsmateriale for at sikre en forsegling mellem behandlingerne og for at undgå forurening af rodkanalsystemet.

Fjern pastaen helt ved den næste aftale. Calciumhydroxidpastaen fjernes let med en endodontisk fil og et par dråber saltopløsning.

Forholdsregler ved brug

Tilpas mængden af pasta i det apikale område til kanalens anatomiske form for at undgå risiko for overløb.

Som midlertidig rodkanalforbinding har pastaen en maksimal behandlingstid på 30 dage.

Kontraindikation

Ingen kendte eller forventede bivirkninger, når det anvendes som anvist.



Advarsel

Dette produkt er fremstillet af calciumhydroxid, som er et hudirriterende stof, der kan forårsage alvorlige øjenskader. Undgå kontakt med øjnene, mundslimhinden og huden for at undgå mulig irritation eller skade. I overensstemmelse med bedste kliniske praksis anbefales det, at patienten bærer en dæmning, beskyttelsesbriller og en vandtæt hagesmæk. Udøveren skal bære handsker, maske og beskyttelsesbriller.

I tilfælde af kontakt med huden eller mundslimhinden skal du straks fjerne det fra vævet og skylle grundigt med vand. Hvis der opstår irritation af huden eller slimhinderne, skal du kontakte en læge.

I tilfælde af kontakt med øjnene skal du straks skylle med rigeligt vand i flere minutter, mens du holder øjenlåget åbent. Ring straks til en læge.

Hvis det er slugt, skal munden skylles med vand og der skal drikkes rigeligt med vand. Søg lægehjælp. Hold den udsatte person i hvile, fremkald ikke opkastning.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur mellem 5°C og 25°C, beskyttet mod lys.

Holdbarhed

5 år. Må ikke anvendes, hvis udløbsdatoen er overskredet.

Bortskaffelse

Bortskaf det tomme glas i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Emballagebeskrivelse

50g glas

REF

11025



Til professionel tandlægebrug
Fremstillet i Schweiz



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland