

Erklæret formål

Solid guttaperka anvendes til fyldning af rodkanaler.

Forberedelse før brug

1. Før produktet benyttes, skal du kontrollere udløbsdatoen og kontrollere, at der ikke er snavs, støv eller andre fremmede stoffer. Du må ikke benytte guttaperka, hvis det er for hårdt, for skrøbeligt eller ikke er elastisk.
2. Læs og forstå producentens brugsanvisning, og gennemgå trin-for-trin-vejledningen grundigt.
3. Forbered alt tilbehør og alle instrumenter før proceduren.

Brugsanvisninger

Før at fylde en rod kanal skal tandlægen følge de følgende trin.

1. Vælg en guttaperka masterpoint, der passer til apex, og kontrollér arbejdslængden før fyldningen af rodkanalen. Klip den overskydende koniske spids af, såfremt det er nødvendigt, før produktet anbringes i rodkanalen.
2. Når guttaperka er anbragt i rodkanalen, skal der tages et røntgenbillede for at bekræfte, at guttaperkapointet befinder sig 1 mm væk fra apex og sidder perfekt i rodkanalen.
3. Fjern guttaperkapointet fra rodkanalen, og tør med et papirpind. Vælg en fil, som er en størrelse mindre end den, der blev anvendt til at forme rodkanalen. (Der kan også anvendes andre professionelle endodontiske instrumenter.) Påfør filen med en forsejler, og fordel forsejleren indvendigt i kanalen. Afslut ved at påføre forsejleren på guttaperkapointspidsen omkring 1 mm og sætte den i rodkanalen.
4. Denne procedure er den mest grundlæggende metode. Men en tandlæge kan også overveje at benytte flere guttaperkapoints eller udføre proceduren på en anden måde på baggrund af patientens symptomer.

- ◆ Guttaperkapoints er til engangsbrug. De må ikke genanvendes.

Vedligeholdelse efter brug

Guttaperkapoints, der ikke anvendes efter proceduren, skal opbevares i en beholder ved stuetemperatur for at undgå kontamination.

Håndtering og opbevaring

1. Skal opbevares ved stuetemperatur. (2-27°C)
2. Skal holdes væk fra antændelige eller brændbare materialer og varme.
3. Skal håndteres forsigtigt. Undgå at kaste eller tabe produkterne.
4. Skal opbevares separat fra andre produkter med forskellige størrelser og typer.

Forholdsregler for brugen

- ◆ Generelle forholdsregler og advarsler
1. Produktet må kun anvendes af professionelle tandlæger. Brugsanvisningerne skal følges nøje.
 2. Må ikke anvendes på patienter, som er allergiske over for produktet.
 3. Dette produkt er kun beregnet til udvortes brug og skal ordineres med henblik på indvortes brug.
 4. Dæk patientens luftvej med en kofferdam før proceduren.
 5. Luk låget tæt efter brug.

- ◆ Forholdsregler under brug

1. Kontrollér for eventuel infektion indvendigt i rodkanalen, før guttaperkapoint anbringes.
2. Brug den samme størrelse og tykkelse for filen og guttaperkapoint.
3. Tag et røntgenbillede efter proceduren med henblik på at sikre en komplet fyldning af kanalen.

Symboler



Opbevaringstid

4 år fra fremstillingsdatoen

Garanti og ansvarsbegrænsning

DiaDent Group International erstatter produktet, såfremt det kan påvises, at det er defekt. DiaDent Group International påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der enten direkte eller indirekte skyldes brugen eller den manglende kompetence til at benytte det beskrevne produkt. Før produktet benyttes, er det brugerens ansvar at afgøre, hvorvidt produktet er egnet til dets beregnede formål. Brugeren hæfter for alle risici og alt ansvar i forbindelse dermed.

European Representative

DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS
Almere, the Netherlands
Tel : 31-36-549-8607 FAX : 31-36-536-7317